

Przesyłanie bioptatów mięśni do analizy mitochondrialnego DNA

**Próbki przyjmowane są w Zakładzie Genetyki Medycznej (ul. Kasprzaka 17a, budynek C, parter), do godziny 15:30 od poniedziałku do piątku.**

**Próbki muszą być opatrzone imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL pacjenta. Razem z próbką muszą być dostarczone: skierowanie na badanie genetyczne i deklaracja świadomej zgody podpisana przez pacjenta.**

Instrukcja dla laboratorium zewnętrznego, zlecającego badanie mtDNA w IMiD:

1. Bioptat umieścić w probówce typu Eppendorf lub innym sterylnym, szczelnie zamykanym pojemniku.
2. Bioptat mięśnia **zamrozić w -20°C** i transportować w warunkach zapobiegających rozmrożeniu np. w bloczku chłodzącym.
3. Bioptat dostarczyć do Instytutu w dniu biopsji. W przypadku braku możliwości dostarczenia bioptatu tego samego dnia, próbkę przechowywać w **-20°C**.